

ialusetcare[®]

PROTECT

PANSEMENT PROTECTEUR ADHÉSIF



Laboratoires
Genevrier
L'EXIGENCE DE VOTRE SANTÉ

FORMES ET PRÉSENTATION

Pansements de dimensions 8 x 8 cm ou 4 x 4 cm.

Boîte de 5 pansements.

COMPOSITION

ialusetcare[®] Protect est composé de 3 couches :

- Une compresse absorbante avec une grille de polyester imprégnée (silicone, carboxyméthylcellulose, acide hyaluronique),
- Un support non-tissé adhésif en polyester,
- Un film adhésif en polyuréthane.

INDICATIONS

Protection des plaies et blessures du quotidien, telles que coupures ou égratignures, et des plaies post-acte chirurgical.

PROPRIÉTÉS

ialusetcare[®] Protect est un pansement fin prêt à l'emploi, simple à appliquer et à retirer.

Le pansement agit comme barrière mécanique et absorbe les exsudats (en cas de plaie suintante) favorisant ainsi la cicatrisation.

Grâce à sa grille souple imprégnée de silicone positionnée sur la compresse, ialusetcare[®] Protect favorise le respect de la plaie avec un retrait atraumatique.

Le support conformable est adaptable aux reliefs anatomiques de la plaie.

Son revêtement semi-perméable constitue une barrière de protection et empêche tout contact de la plaie avec l'eau afin d'éviter toute macération et permettre la cicatrisation dans les meilleures conditions.

MODE D'EMPLOI

Se laver les mains.

Nettoyer préalablement la plaie et son contour avec de l'eau et du savon, ou à l'aide d'une solution de sérum physiologique. Après avoir retiré les 2 films protecteurs, appliquer ialusetcare[®] Protect directement sur la plaie.

Renouveler l'application en fonction du besoin et de l'évolution de la plaie.

Peut se garder sous la douche ou le bain.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à l'un des composants.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- En cas de signe local d'infection, consulter un professionnel de santé pour un traitement approprié.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Pansement à usage unique : ne pas réutiliser pour éviter tout risque de contamination.
- Ne pas utiliser si l'emballage unitaire est endommagé.
- Rapportez les produits périmés ou non utilisés à votre pharmacien qui se chargera de leur élimination.

En cas de doute, n'hésitez pas à contacter votre médecin et/ou votre pharmacien.

CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite figurant sur l'étui.

Ce dispositif doit être conservé à une température inférieure à 25°C.

Ne pas congeler.

Date de mise à jour de la notice : Février 2019.



Laboratoires Genevrier
280 rue de Goa - Z.I. Les 3 Moulins
Parc d'activités de Sophia Antipolis
06901 Sophia Antipolis - France



Ne pas réutiliser, usage unique



Fabricant



Lire la notice avant usage



Année d'apposition :
2019



Attention - consulter
les précautions d'emploi



Numéro de lot



Température de stockage



Date limite d'utilisation

